

	メーカー	デバイス種類	デバイスモデル名	モデル番号	マグネットモード On/Off設定の可否	マグネットモードoff 設定時の磁石の影響	マグネットモード中の 作動	マグネット警告ビープ音	マグネットレート (ppm)	ベージング出力 (V/ms)	AV delay (ms)	マグネットイベント 記録ログ表示
1	Abbott	TV-PM	アシュリティ MRI SR	PM1272	可	影響しない	非同期モード	なし	100(BOL) \geq 3.2 97.9 \geq 2.9 93.6 \geq 2.8 89.3 \geq 2.7 85.0(ERI) \geq 2.6 80.7(EOL) \geq 2.5	設定出力 または Auto Capture使用時 固定出力設定 + 1 V	-	可
2	Abbott	TV-PM	エンデュリティ MRI SR	PM1172	可	影響しない	非同期モード	なし	100(BOL) \geq 3.2 97.9 \geq 2.9 93.6 \geq 2.8 89.3 \geq 2.7 85.0(ERI) \geq 2.6 80.7(EOL) \geq 2.5	設定出力 または Auto Capture使用時 固定出力設定 + 1 V	-	可
3	Abbott	TV-PM	アシュリティ MRI DR	PM2272	可	影響しない	非同期モード	なし	100(BOL) \geq 3.2 97.9 \geq 2.9 93.6 \geq 2.8 89.3 \geq 2.7 85.0(ERI) \geq 2.6 80.7(EOL) \geq 2.5	設定出力 または Auto Capture使用時 固定出力設定 + 1 V	120	可
4	Abbott	CRT-P	クアドラ アルーア MP	PM3562	可	影響しない	非同期モード	なし	100(BOL) \geq 3.2 97.9 \geq 2.9 93.6 \geq 2.8 89.3 \geq 2.7 85.0(ERI) \geq 2.6 80.7(EOL) \geq 2.5	設定出力 または Auto Capture使用時 固定出力設定 + 1 V	120	可
5	Abbott	CRT-P	アルーア CRT-P	PM3222	可	影響しない	非同期モード	なし	100(BOL) \geq 3.2 97.9 \geq 2.9 93.6 \geq 2.8 89.3 \geq 2.7 85.0(ERI) \geq 2.6 80.7(EOL) \geq 2.5	設定出力 または Auto Capture使用時 固定出力設定 + 1 V	120	可
6	Abbott	TV-ICD	エリプス VR DF-4	CD1377-36QC	可	影響しない	頻拍検出しない	なし	-	-	-	可
7	Abbott	TV-ICD	ギャラン ICD VR DF-4	CDVRA500Q	可	影響しない	頻拍検出しない	あり	-	-	-	可
8	Abbott	TV-ICD	フォーティファイ アシュラ VR/DF-1	CD1359-40C	可	影響しない	頻拍検出しない	なし	-	-	-	可
9	Abbott	TV-ICD	エリプス VR/DF-1	CD1377-36C	可	影響しない	頻拍検出しない	なし	-	-	-	可
10	Abbott	TV-ICD	エリプス DR/DF-4	CD2377-36QC	可	影響しない	頻拍検出しない	なし	-	-	-	可
11	Abbott	TV-ICD	ギャラン ICD DR DF-4	CDDRA500Q	可	影響しない	頻拍検出しない	あり	-	-	-	可
12	Abbott	TV-ICD	フォーティファイ アシュラ DR	CD2359-40C	可	影響しない	頻拍検出しない	なし	-	-	-	可
13	Abbott	TV-ICD	エリプス DR	CD2377-36C	可	影響しない	頻拍検出しない	なし	-	-	-	可
14	Abbott	CRT-D	ユニファイ アシュラDF-4	CD3361-40QC	可	影響しない	頻拍検出しない	なし	-	-	-	可
15	Abbott	CRT-D	ユニファイ アシュラDF-1	CD3361-40C	可	影響しない	頻拍検出しない	なし	-	-	-	可
16	Abbott	CRT-D	クアドラ アシュラ MP DF-4	CD3371-40QC	可	影響しない	頻拍検出しない	なし	-	-	-	可
17	Abbott	CRT-D	ギャラン HF DF-4	CDHFA500Q	可	影響しない	頻拍検出しない	あり	-	-	-	可
18	Abbott	CRT-D	クアドラ アシュラ MP DF1	CD3371-40C	可	影響しない	頻拍検出しない	なし	-	-	-	可
19	Abbott	Leadless PM	アヴェイル VR L	LSP112V	可	影響しない	非同期モード	なし	100 Vbatt \geq 3.0 V 97 3.0 > Vbatt \geq 2.9 V 94 2.9 > Vbatt \geq 2.8 V 91 2.8 > Vbatt \geq 2.7 V 88 2.7 > Vbatt \geq 2.6 V 85 2.6 > Vbatt	設定出力	-	可